

小さく保管でき 持ち運びもラクラク!

普段は収納バッグに入れ、**コンパクト&軽量**なので、携帯しやすく、また、ご家庭やマンション、一般・公共施設をはじめ、車にも装備でき、いざという時に、広げてけが人を運搬できる担架として使用できます。

救急担架

携帯用緊急担架



収納手順

- ① 左右引き手部分を内側に折り畳みます
- ② さらに内側に折り畳みます
- ③ 1/2になる様に折り畳みます
- ④ 片方を中央の所まで折り畳みます
- ⑤ 反対も中央の所まで折り畳みます
- ⑥ 片方の1/2を下へ折り畳みます
- ⑦ 反対の1/2を上へ折り畳みます
- ⑧ 全体を1/2で折り畳みます

専用の収納バッグにしまえば完了です。

これで完了



場所を選ばずどこでも
携帯できる緊急担架。

コンパクト収納!
蛍光オレンジの収納ケース

ご家庭で救急箱や防災グッズ
などと一緒に入れられると便利。



コンパクト・軽量の為あらゆるシチュエーションに常備可能

【使用場所例】

- ご家庭 ●オフィス ●官公庁 ●病院 ●介護施設 ●学校 ●イベント会場
- 工場 ●工事現場 ●マンション組合・自治会 ●バス・車両等 ●祭事場
- レジャー施設 ●乗馬クラブ ●旅館・ホテル ●鉄道、地下鉄等の交通機関
- スポーツ会場 ●ゴルフ場 ●遠足等の課外活動 ●レクリエーション場所 等


強度に優れたナイロン素材、
汚れても水洗いOK!



持ち手の一カ所にかかる引張り強度は80kgまで耐えられます

型番:K01-Y

本体
サイズ:縦1700x横670mm
素材:1000D ナイロン(PU加工)
持ち手/PPテープ
カラー:イエロー(山吹色)
重量(本体+ケース):約450g
収納ケース
サイズ:縦130x横190x厚さ60mm
カラー:蛍光オレンジ

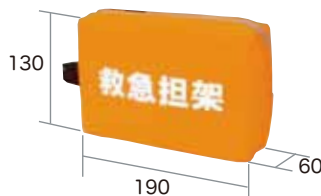

※エアで膨らみません